

布氏菌病虎红平板凝集试验抗原说明书

批准文号：兽药生字 154028017

兽用非处方药

【兽药名称】

通用名称：布氏菌病虎红平板凝集试验抗原

商品名称：无

英文名称：Brucella Antigen for Rose-Bengal Plate Agglutination Test

汉语拼音：Bushijunbing Huhong Pingbanningjishiyan Kangyuan

【主要成分与含量】 本品主要成分为布氏菌 S2 株（CVCC70502）或 S2 和 A99 株（CVCC70502 和 CVCC70203），含量为与 1:45 稀释阳性血清国家标准品出现平板凝集反应，与 1:55 稀释阳性血清国家标准品不出现平板凝集反应。

【性状】 均匀悬浮液，久置后，上部澄清，底部有少量沉淀。

【作用与用途】 用于虎红平板凝集试验诊断布氏菌病。

【用法与判定】 取被检血清 0.03ml 与抗原 0.03ml 相混合，4 分钟内观察结果。凡出现+以上反应者判为阳性。对出现阳性反应的动物，须进一步作补体结合试验或其他诊断试验。

凝集反应判定标准：

++++ 出现大的凝集片或颗粒，液体完全透明。

+++ 有明显的凝集颗粒，液体几乎完全透明。

++ 有较明显的凝集颗粒，液体稍透明。

+ 稍能见到凝集，液体混浊。

- 无凝集，液体均匀混浊。

【注意事项】

（1）使用前应充分摇匀，出现污染或有摇不散的凝块时不得使用。

（2）抗原和血清应在室温中放置 30~60 分钟后，再进行试验。

【规格】 （1）5ml/瓶 （2）10ml/瓶 （3）20ml/瓶

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期为 12 个月。

【包装】 10 瓶/盒

仅供兽医诊断使用