

日本血吸虫抗体检测试纸条说明书

兽用

【兽药名称】

通用名 日本血吸虫抗体检测试纸条

英文名 Schistosoma Japonicum Antibody Test Strip

【主要成分与含量】

试剂盒组分	规格与数量
日本血吸虫抗体检测试纸条	20条/50条/100条
说明书	1份

【作用与用途】 用于检测牛、羊血清中的日本血吸虫抗体。

【用法与判定】 1 用法

1.1 样品稀释 取待检样品 5 μ l, 加入 95 μ l 生理盐水稀释混匀。


1.2 操作步骤 取出检测试纸条, 手持手柄端, 将测试端(箭头端)浸入稀释好的待检样品中, 液面不要超过 MAX 标志线, 静置 5~10 分钟判定结果。

2 判定

2.1 阴性 仅在质控线处(C)出现一条紫红色条带, 检测线(T)处未出现一条紫红色条带, 判定为阴性(如图一)。

2.2 阳性 检测线处(T)和质控线处(C)各出现一条紫红色条带, 判定为阳性(如图二);

2.3 无效 在质控线处(C)无明显条带出现, 判定为无效(如图三);

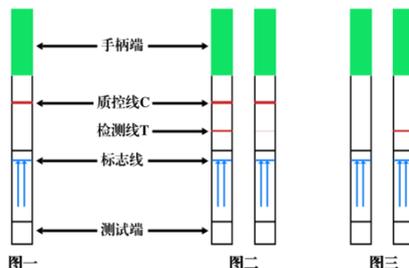



【注意事项】

- (1) 本试纸条仅供体外检测使用。
- (2) 请勿使用包装破损、超过有效期的试纸条。
- (3) 在使用过程中须做好个人防护措施。
- (4) 本试纸条不可重复使用。
- (5) 试验完毕后，试纸条和塑料吸头需进行无害化处理。

【规格】 (1) 20 条/盒 (2) 50 条/盒 (3) 100 条/盒

【贮藏与有效期】 室温干燥保存，有效期 12 个月。

仅供兽医诊断使用